

# Liuskapöytä kiinteä CLINITEK Advantus, 3086508

Tuotekoodi 3086508

Kiinteä liuskapöytä (Table fixed assay)/ CLINITEK Advantus

Clinitek Advantus tunnistaa automaattisesti virtsatestiliuskan kiinteällä liuskapöydällä ja kuljettaa sen lukualueelle ja sieltä jäteastiaan. Myös kalibrointi tapahtuu automaattisesti ennen jokaisen liuskan määrittystä.

Kalibrointi tapahtuu jokaisessa lukupäässä välittömästi ennen liuskan lukemista. Kiinteässä alustassa on kaksi valkoista kalibrointipistettä, jotka sijaitsevat suoraan kummankin lukupään alla. Kun liuska tulee lukupään kohdalle, laite kalibroituu tätä määrittystä varten lukemalla kalibrointipisteen.

Huolto-ohjeiden mukaisesti kiinteä liuskapöytä tulee puhdistaa päivittäin. Liuskapöytää puhdistaessa vältä pyyhkimästä kahden valkoisen kalibrointineliön yli. Puhdista kalibrointineliöt pelkällä vedellä kostutetulla vanupuikolla.



## Myynti ja asiakaspalvelu

09 341 72 800

mekalasi(at)mekalasi.fi

© 2019 Mekalasi Oy